





Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Fonctions	Mode d'emploi	N° AMM ou CE	Conditionnement
MENICARE SOFT 	MENICON	LS	<ul style="list-style-type: none"> - Polyhexanide 0.0001 % - Macrogolglycerol hydroxystéarate - Disodium édétate - Comfortec™ 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage - Déprotéinisation - Décontamination - Conservation - Rinçage 	Rincer les lentilles pendant 5 secondes avec la solution MeniCare Soft. Conserver les lentilles dans l'étui rempli de MeniCare Soft. Trempage 4 heures minimum afin de les décontaminer. Rincer les lentilles avant la pose avec MeniCare Soft.	CE 0483	<ul style="list-style-type: none"> - Flacon de 50 ml + étui - Flacon de 360 ml + étui - Pack 2x360 ml + étui
OPTI-FREE® EXPRESS® 	ALCON	LS	<ul style="list-style-type: none"> - Polyquad - Amidoamine / Aldox - Citrate - EDTA - Tetric® 1304 <i>* Tetric®, marque déposée de BASF</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage - Rinçage - Décontamination - Hydratation - Conservation 	Rinçage des lentilles. Décontamination par trempage dans 10 ml de solution pendant 6 heures minimum ou toute la nuit. Rinçage des lentilles avant la pose. Hydratation des lentilles.	CE 0123	<ul style="list-style-type: none"> - 1 flacon de 355 ml + 1 étui de trempage - 1 bi-pack de 2 flacons 355 ml - 1 Pack 6 mois de flacon 355 ml + 1 étui de trempage - 1 flacon de 470 ml + 1 étui de trempage - 1 flacon de 120 ml + 1 étui de trempage
OPTI-FREE® UNIDOSES 	ALCON	LS	<ul style="list-style-type: none"> - Polyquad - Citrate - EDTA 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage - Rinçage - Décontamination - Trempage - Conservation 	Massage des lentilles avec quelques gouttes de la solution. Rinçage des lentilles. Décontamination par trempage dans 10 ml de solution pendant 4 h minimum ou toute la nuit.	CE 0123	<ul style="list-style-type: none"> - Boîte de 30 doses x10 ml + 1 étui de trempage - Pack de 90 doses 10 ml + 3 étuis de trempage
OPTI-SOAK® Solution, avec la formule de UNIQUE-pH® solution multi-fonctions. 	ALCON	LR	<ul style="list-style-type: none"> - Polyquad - Tetric® 1304 - HP-GUAR (AL 12355) - Polyéthylène glycol - Acide borique - EDTA <i>* Tetric®, marque déposée de BASF</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage - Décontamination - Conservation - Rinçage - Préparation à la pose - Hydratation 	<ul style="list-style-type: none"> - Masser soigneusement les lentilles avec 2 ou 4 gouttes d'OPTI-SOAK® Solution. Rincer abondamment avec OPTI-SOAK® Solution. - Décontamination des lentilles pendant au moins 4 heures. 	CE 0123	<ul style="list-style-type: none"> - Flacon de 120 ml