









Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Mode d'emploi	N° AMM ou CE	Conditionnement
<p>AQUIFY</p> 	CIBA VISION	LR / LS	<ul style="list-style-type: none"> - Hyaluronate de sodium - Chlorure de sodium - Phosphate de sodium 	<ul style="list-style-type: none"> - Instiller 1 ou 2 gouttes directement sur les yeux (ou sur les lentilles pendant le port). - Ne pas toucher l'extrémité du compte-gouttes ni avec les doigts, ni avec l'oeil, ni avec les lentilles. - Cligner des yeux plusieurs fois après. 	CE 0086	Flacon de 10 ml
<p>AVIZOR MOISTURE DROPS</p> 	AVIZOR	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Hyaluronate de sodium 0,10% - EDTA 0,1 % - Polyhexanide 0,0001 % 	<p>Gouttes humectantes pour soulager les symptômes d'irritation, sécheresse et fatigue oculaire.</p> <p>Appliquer Avizor Moisture Drops dans l'oeil selon le besoin.</p> <p>Cligner 2/3 fois sans retirer les lentilles.</p>	CE 0318	<ul style="list-style-type: none"> - Flacon de 15 ml - Unidoses sans conservateurs
<p>Blink™ Contacts</p> 	AMO	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Hyaluronate de sodium 0,15% - Chlorure de sodium - Phosphates de sodium 	<p>Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque oeil selon les besoins.</p> <p>Il n'est pas nécessaire de retirer les lentilles de contact. Pour un confort supplémentaire, instiller 1 ou 2 gouttes sur chaque lentille avant leur pose.</p>	CE 0050	<ul style="list-style-type: none"> - Unidoses de 20x0,35 ml - Flacon de 10 ml (OcuPure™ 0,005%)
<p>Blink™ Refreshing</p> 	AMO	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Alcool Polyvinylique 1,4% - Edétate disodique 0,01% - Chlorure de sodium - Phosphates de sodium - Composé de Chlorite/Peroxyde (CPC) 	<p>Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque oeil selon les besoins aussi fréquemment que nécessaire.</p> <p>Cligner plusieurs fois des yeux afin de les humidifier. Il n'est pas nécessaire de retirer les lentilles de contact.</p>	CE 0050	<ul style="list-style-type: none"> - Unidoses de 20x0,50 ml - Flacon de 10 ml (Chlorite/Peroxyde (CPC) 0,06%)
<p>CLEANING DROPS</p> 	AVIZOR	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Poloxamère - PVP 90 - Polyhexanide 	<p>Gouttes humectantes qui nettoient, lubrifient et hydratent tous types de lentilles d'un simple battement de paupières et sans avoir à retirer les lentilles.</p> <p>Sans retirer la lentille de contact, appliquer une ou deux gouttes dans chaque oeil, puis battre des paupières plusieurs fois.</p> <p>Avizor Cleanin Drops peut être utilisé jusqu'à 4 fois par jour</p>	CE 0318	Flacon de 15 ml

Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Mode d'emploi	N° AMM ou CE	Conditionnement
<p>CLENS 100®</p> 	ALCON	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Citrate/Borate - Chlorure de Sodium - Edétate disodique - Polyquad - RLM 100 (Acide carboxylique Ether Lauryl Peg-11) - Tetronic* 1304 <p>* Tetronic, une marque de BASF Corporation, est de la poloxamine</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rafraîchir les lentilles. - Contribuer à prévenir la formation de dépôts et de protéines sur les lentilles de contact. - Pour rafraîchir les lentilles : Instiller 2 gouttes dans l'œil et cligner 2/3 fois sans retirer les lentilles de contact. - Pour contribuer à prévenir la formation de protéines et de dépôts : Instiller 2 gouttes dans l'œil et cligner 2/3 fois sans retirer les lentilles de contact, ce 4 fois par jour. 	CE 0123	Flacon de 10 ml de solution
<p>Ilast Flacon de 15ml</p> 	HORUS PHARMA	LS / LR	<ul style="list-style-type: none"> - Hyaluronate de sodium 0,2% - PHMB 0,00015% - EDTA 0,01% 	<p>Instiller 2 gouttes dans chaque œil aussi souvent que nécessaire ou selon la prescription médicale. Ilast peut être utilisé pendant le port de lentilles de contact quelqu'en soit le type. Convient aux adultes et aux enfants.</p>	CE 0473	Flacon de 15 ml
<p>ReNu Gouttes de Confort</p> 	BAUSCH & LOMB	LS	<ul style="list-style-type: none"> - Polyvidone 2% - Chlorure de Sodium - Acide Borique et Hydroxyde de sodium - Eau PPI 	<p>Lubrification et hydratation des lentilles. Sans conservateur. Appliquer la solution de confort ReNu dans l'œil à chaque fois qu'une sensation d'inconfort se fait sentir.</p>	CE 0050	<ul style="list-style-type: none"> - Boîte de 5 unidoses de 0,60 ml - Boîte de 30 unidoses de 0,60 ml