





| Nom du produit   | Laboratoire | Type de lentilles | Composition   | Mode d'emploi   | N° CE   | Conditionnement   |
|--|-------------|-------------------|---|---|---------|---|
| AVIZOR SALINE<br>           | AVIZOR      | LS / LR           | Solution aqueuse, stérile, isotonique et tamponnée. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisation avec des lentilles de contact : rinçage. Après avoir terminé le processus de nettoyage ou si l'opération s'avère nécessaire, prendre la lentille et la déposer sur la paume de la main, puis ajouter un jet abondant de solution et frotter entre le pouce et l'index. Lorsque la procédure est terminée, poser la lentille directement sur l'œil.</li> <li>Usage ophtalmique : lavage, instillation ou bain oculaire. Verser quelques gouttes d'AVIZOR SALINE UNIDOSE dans l'œil afin d'éliminer les substances ou particules irritantes ou appliquer la solution sur un bâtonnet pour nettoyer doucement la paupière et la zone périoculaire. Changer de bâtonnet pour l'autre œil.</li> <li>Utilisation avec des comprimés déprotéinisants pour le nettoyage des lentilles de contact : dissolution. Utiliser la solution conformément au mode d'emploi des comprimés.</li> </ul> | CE 0318 | - 30 Unidoses x 5 ml<br>- Flacon de 350 ml (Polyhexanide) |
| LENS PLUS OcuPure<br>       | AMO         | LS / LR           | - NaCl 0,85 %<br>- OcuPure 0,005 %                  | Rinçage après les différentes étapes de l'entretien et avant la pose.<br>Dissolution de comprimés de déprotéinisation   | CE 0050 | - Flacon de 120 ml<br>- Flacon de 360 ml                  |
| POLYRINSE™<br>             | ALCON       | LS / LR           | - NaCl 0,9 %<br>- Sans conservateur                 | Rinçage après les différentes étapes de l'entretien ou avant la pose.<br>Décontamination thermique des lentilles de contact souples avec un dispositif de chauffage.  | CE 0123 | Boîte de 30 unidoses 15 ml                                |
| SOFT WEAR SALINE PLUS<br> | CIBA VISION | LS / LR           | - Poloxamer 0,02 %<br>- NaCl<br>- Tampon A.B.S.     | Nettoyage des lentilles à la dépose. Rinçage des lentilles avant/après chaque étape de l'entretien. Conservation des lentilles jusqu'à 30 jours.  | CE 0086 | Flacon de 360 ml  |